


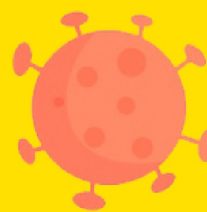

ขั้นตอน การทำความสะอาด หน้ากาก N95



- ห้องปฏิบัติการหรือ ward มีหน้ากากหลายชั้นที่ต้องนำส่งลดการปนเปื้อนในเวลาเดียวกัน สามารถใส่รวมในภาชนะชั้นที่ 2 เดียวกันได้
- เช็ดทำความสะอาดผิวรอบนอกกล่องด้วย 70 % แอลกอฮอล์ รอแห้ง เขียนหรือติดฉลากที่ภาชนะระบุชื่อหน่วยงาน (อาจเป็นรหัส)
- ล้างมือด้วยวิธีที่ถูกต้อง
- นำกล่องส่งไปยังห้องหรือบริเวณที่ทำการลดการปนเปื้อนหน้ากาก



1. การลดการปนเปื้อนหน้ากาก

- ทำบัญชีการรับหน้ากากทำการลดการปนเปื้อนระบุวันที่รับ เวลาและชื่อผู้นำส่ง
- นำถุงหน้ากากออกจากกล่อง
- ผู้ปฏิบัติงานใส่ PPE ที่เหมาะสม เช่น กาวนิ์ ถุงมือ หน้ากากอนามัย
- นำหน้ากากออกจากถุงวางในเครื่องมือที่ทำการลดการปนเปื้อนเช่น เครื่องอบแห้ง เครื่องรมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ในลักษณะที่ให้ผิวด้านนอกหน้ากากสามารถสัมผัสกับความร้อนและสารเคมีได้อย่างทั่วถึงและไม่ปนเปื้อนระหว่างชั้น หน้ากาก ถุงพลาสติกทั้งเป็นขยะติดเชื้อ นำถุงใส่กล่องพลาสติกสำหรับขนส่งหน้ากากให้เช็ดทำความสะอาดด้วย 70 % แอลกอฮอล์เพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำ
- เปลี่ยนถุงมือ ตั้งระบบการทำงานตามสภาวะที่ใช้ในการลดการปนเปื้อนเชื้อ และเปิดระบบการทำงานของเครื่อง โดยใช้วิธีที่เหมาะสมกับหน่วยงาน
- เมื่อครบเวลาการทำงานของเครื่อง ปิดเครื่อง
- เปลี่ยนถุงมือคู่ใหม่ นำหน้ากากที่ผ่านการลดการปนเปื้อนใส่ถุงกระดาษที่เขียนหรือติดฉลากที่ถุงระบุชื่อผู้ใช้ และหน่วยงาน (อาจเป็นรหัส)
- นำถุงใส่หน้ากากใส่ลงกล่องพลาสติก
- เช็ดทำความสะอาดผิวรอบนอกกล่องด้วย 70 % แอลกอฮอล์ รอแห้งเขียนหรือติดฉลากที่ภาชนะระบุชื่อหน่วยงาน
- ส่งกลับไปยังหน่วยงานเพื่อใช้ซ้ำ
- ทำบัญชีส่งคืนหน้ากากที่ทำการลดการปนเปื้อน ระบุวันที่รับ เวลาและชื่อผู้รับ



2. การนำหน้ากากที่ผ่านการลดการปนเปื้อนกลับมาใช้ซ้ำ

- เลือกหน้ากากที่ระบุชื่อหรือรหัสของตนเอง
- ใส่ถุงมือก่อนนำหน้ากากออกจากถุง
- นำหน้ากากออกจากถุง อย่าสัมผัสผิวด้านในหน้ากาก
- ตรวจสอบสภาพหน้ากาก หากชำรุด หรือพบมีการปนเปื้อน หรือพบว่าเป็นการใช้ซ้ำเกิน 4 ครั้ง ให้ทิ้งไม่นำมาใช้ซ้ำ
- ใส่หน้ากากตามวิธีที่ถูกต้อง
- ทำการทดสอบความแนบสนิทด้วยตนเอง (fit check / seal check) หากไม่ผ่านให้ทิ้ง ไม่นำมาใช้ซ้ำ
- ถอดถุงมือคู่ที่ใช้ใส่หน้ากากทิ้ง
- ใส่ PPE ขึ้นต่อไปตามขั้นตอนการใส่ที่เหมาะสมตามที่หน่วยงานกำหนด



ผลการศึกษาโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ไม่ควรใช้หน้ากากซ้ำเกิน 4 ครั้ง

