

หน้ากากผ้า

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ทำการทดลองหน้ากากผ้าที่ผลิตจากผ้าฝ้ายมัสลิน สามารถซักและใช้ซ้ำถึง **100 ครั้ง** โดยเส้นใยฝ้ายยังคงเดิม



- แช่ในน้ำผสมผงซักฟอก
- อาจเติมน้ำยาฆ่าเชื้อลงไป 10-15 นาที

ทำการ ชัก/ขยี้ เบาๆ ให้ทั่วทั้งผืนหน้ากาก และ เชือก หรือ ยางรัดหูของหน้ากาก

*อย่าใช้แปรงซักผ้าขัดหน้ากากผ้าเพราะจะทำให้เส้นใยผ้า ยืด ขยาย หรือเป็นนูนได้

ล้างออกด้วยน้ำสะอาด

นำไปตากให้แห้งก่อนใช้งาน

*สามารถใช้ซ้ำได้นานกว่าหน้ากากจะเสียรูปทรง ไม่มีความกระชับ สายคล้องหูเกิดความชำรุด